

## Punerea lamei de bisturiu




Lama de bisturiu are o fanta - mai larga spre baza si mai ingusta spre varf. Partea mai larga se foloseste pt. aplicarea pe sina manerului, iar partea mai ingusta fixeaza lama pe sina manerului.




Manerul bisturiului are la varf o parte speciala prevazuta cu un sant care permite alunecarea in fanta lamei si fixarea lamei.




Deși lama se poate pune și cu mâna e preferabil să fie manevrată cu o pensă pentru a evita ranirea.

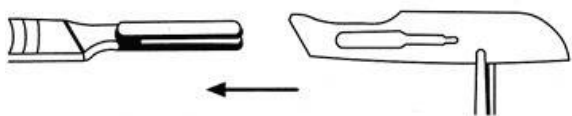

Se aseaza portiunea larga a fantei lamei pe santul manerului.

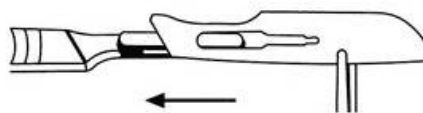

Se aluneca lama pe sant.

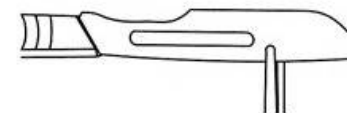

Cand lama ajunge in pozitia corecta se aude un clic.



## Scoaterea lamei de bisturiu



Se prinde baza lamei cu o pensa Pean.



Se ridica lama in asa fel incat sa poata fi alunecata peste opritorul manerului.



Se impinge lama, alunecand-o prin santul manerului.



Se impinge lama, alunecand-o prin santul manerului.



Se impinge lama, alunecand-o prin santul manerului.



Lama scoasa de pe maner.

## Folosirea bisturiului

Pentru practicarea unei incizii bisturiul poate fi tinut ca ...



.... ca un cutit



... ca un creion



... ca un pumnal